


「VSRAD(ブイエスラド)通信」は、早期 AD 診断支援システム「VSRAD」のユーザー登録をいただいている皆様へ、VSRAD に関する最新情報やご利用に役立つ情報をお知らせするニュースレターです。

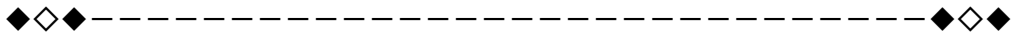

こんにちは！VSRAD ユーザー登録事務局です。

「VSRAD(ブイエスラド)通信」では、VSRAD ユーザーの皆様から多かったお問合せや、開発最新情報、システムについてのご連絡などについてお届けいたします。

今回は、VSRAD 適正使用ガイドライン作成について、VSRADplus がインストール時に起動しない場合の対応についてなどの情報をお知らせいたします。

是非お読みください！

┌──INDEX──┐

|

| 《1》VSRAD 適正使用ガイドライン作成のご案内

|

| 《2》インストール時に VSRADplus が起動しない場合の対応方法について

|

| 《3》ホームページ更新のご案内

|

| 《4》事務局より～編集後記

|

---

《1》VSRAD 適正使用ガイドライン作成のご案内

---

VSRAD は 2005 年 11 月リリース後、多くの医療機関様で活用されております。しかしながら、簡便に結果が出るが故に診断支援の範囲を超えた使い方がなされしう懸念が指摘されており、コンピュータ画像統計解析手法の有用性と限界を踏まえて、VSRAD の適正利用を促すべく、VSRAD アドバイザリーボードにてガイドラインが作成されました。

<http://www.vsrad.info/manual/download/guideline1.pdf>

---

## 《2》インストール時に VSRADplus が起動しない場合の対応方法について

---

OS が Windows XP SP1 または SP2 で Windows Update が適用されていない場合に、VSRADplus インストール時に「.Net Framework2.0 SP1」がインストールできず、このような現象が起こることがあります。

ご使用の OS の SP(サービスパック)、インターネットで Windows Update ができるかどうかで対処方法が異なります。

### 【ご注意】

※システム管理者に SP のアップデートを行っても問題無いか、必ずご確認ください。(SP のアップデートにより、一部のソフトウェアで不具合がおきる可能性があります)

※SP のアップデート前に、必要なデータ等のバックアップをマイクロソフト社は推奨しております。

### ■Windows XP SP1 の場合

マイクロソフト社のサポート期間が終了しており、マイクロソフト社より SP1 の環境は避けていただきたいと言われております。SP2 へのアップデートをお願いいたします。(SP2、SP3 の2種類ありますが、SP2 をお勧めいたします)

SP2 へアップデートしても VSRAD が起動しない場合は、「■Windows XP SP2 の場合」の手順も実施してください。

### ◆インターネットに繋がる場合

[スタート]→[すべてのプログラム]→[Windows Update]でアップデートするか、下記 URL よりインストーラーをダウンロードします。

### ※SP2 ダウンロードサイト

<http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=ja&FamilyID=049c9dbe-3b8e-4f30-8245-9e368d3cdb5a>

### ◆インターネットに繋がらない場合

ネットワークに繋がっている PC から SP2 のインストーラーをダウンロードし、VSRAD をご使用の PC にインストールしてください。環境がない場合は、VSRAD システムサポートセンター(systemhelp@vsrad.jp)までお問合せください。

## ■Windows XP SP2 の場合

次の手順により「Windows インストーラ 3.1」をインストールし、VSRAD を再インストールします。

(1)VSRADplus をアンインストールしてください

↓

(2)Windows インストーラ 3.1(下記からダウンロード) をインストールしてください。

↓

(3)VSRADplus を再インストールしてください。

※(1)(2)は順不同です。

※Windows インストーラダウンロード

<http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=ja&familyid=889482fc-5f56-4a38-b838-de776fd4138c>

なお、ご不明な点があれば、VSRAD システムサポートセンター

([systemhelp@vsrad.jp](mailto:systemhelp@vsrad.jp))までお問合せください。

※詳細はホームページもご参照ください。

---

## 《3》ホームページ更新のご案内

---

5月11日(月)、ホームページ(<http://www.vsrad.info/>)を更新いたしました。

主な更新内容をご紹介します。

### ■Q&A

VSRADplus の QA を中心に大幅更新

### ■講演・発表・文献一覧を更新

講演・発表→15件追加(全193件)

文献→8件追加(全88件)

※2009年3月現在

### ■マニュアル・パンフレットを更新

・VSRAD 適正使用ガイドライン 新規掲載

・解説シリーズ1「解析結果と評価について」改訂版掲載

・解説シリーズ2「解析結果レポートのみかた」改訂版掲載

・VSRAD テクニカルシリーズ(1)

「MRI 装置メーカーによる VSRAD の推奨撮像条件」改訂版掲載

・VSRADplus 操作デモ 改訂版掲載

---

《4》事務局より～編集後記

---

桜の季節も終わり、木々の緑に元気をもらう今日この頃。  
すっかり暖かくなり、過ごしやすい季節となりました。

とはいえ、まだまだ朝晩は肌寒く感じることもありますので、  
どうぞお体にお気をつけて元気にお過ごしください！

---

編集・発行：VSRAD ユーザー登録事務局

※「VSRAD(ブイエスラド)通信」に関するお問合せや、VSRAD をご利用中にお困りのことがございました場合には、お手数ですが、「VSRAD システムサポートセンター」までお問合せ下さい。(本メールにご返信いただいてもお受けすることができません。)

VSRAD システムサポートセンターメールアドレス  
systemhelp@vsrad.jp

※配信停止をご希望の場合はお手数ですが、件名に「配信不要」等のコメントを明記のうえ、このメールにご返信をお願いいたします。

Copyright(C)2009

Eisai Co.,Ltd. & Pfizer Japan Inc.

---