

「VSRAD 通信」は、早期 AD 診断支援システム「VSRAD」のユーザー登録をいただいている皆様へ、VSRAD に関する最新情報やご利用に役立つ情報をお知らせするニュースレターです。

こんにちは！VSRAD ユーザー登録事務局です。

「VSRAD 通信」は、VSRAD ユーザーの皆様から多かったお問合せや、開発最新情報、システムについてのご連絡などについてお届けさせていただきます。

また、今回は、ユーザーアンケートを実施いたします。

皆様のご回答、どうぞよろしくお願いいたします！！

I N D E X

《1》ユーザーアンケートのお願い

《2》FAQ～よくあるご質問

《3》事務局より～編集後記

《1》ユーザーアンケートのお願い

VSRAD も、おかげさまで、リリースから約半年が経ちました。

VSRAD システムサポートセンターでは、毎日お問合せをいただき、微力ながら皆様の導入支援をさせていただいておりますが、この度、ユーザーの皆様のご利用状況やお困りの点について伺うアンケートを実施させていただくことになりました。

アンケートでお寄せいただいたご意見に関しましては、今後のサポートや次期開発の参考にさせていただきます。

下記 URL をクリックし、アンケートフォームへお進み下さい！

皆様のご意見をお待ちしております！

【アンケートフォーム URL】

<https://enq0.mediagalaxy.ne.jp/A585920/w/enq/vsrad01/>

《受付期間：2006 年 5 月 31 日（水）～2006 年 6 月 6 日（火）》

《2》FAQ～よくあるご質問

「FAQ～よくあるご質問」では、VSRAD システムサポートセンターへのお問合せのうち、多いものについて、ご説明いたします。

【Q1】

同じ施設内で複数のパソコンにインストールしてもよいですか？

【A1】

基本的な考え方は1ユーザー・1登録ですので、同一ユーザーであれば複数PCへのインストールは可能です。

【開発スタッフより】

VSRADでは、サポート情報やバージョンアップ情報、万一不具合が生じた場合などの情報を、できるだけ早く確実にお届けするため、「1ユーザーに1枚・1登録」を基本とさせていただいております。そのため、同一ユーザーであれば複数のPCへのインストールは可能ですが、1施設・複数ユーザーである場合には、お手数ですが、改めてユーザー登録をしていただきますようお願いいたします。

【Q2】

解析結果を他のPCで見るとはできますか？

【A2】

解析結果は他のPCで見ることができます。
VSRADがインストールされているかどうかによって、以下ご対応下さい。

(1)VSRADがインストールされているPCの場合

VSRADの処理結果データは、デフォルトではMRI入力画像のフォルダに保存されますので、そのデータをコピーしていただければ他のVSRADがインストールされているPCでも見ることもできます。

(2)VSRADがインストールされていないPCの場合

VSRADの[ファイル]メニューから[レポートを画像として保存]を選択することでレポートを画像ファイルとして保存することができます。その画像ファイルをコピーしていただければ、Windows付属の画像ビューアーで見ることができます。

《3》事務局より～編集後記

今回の「VSRAD通信」Vol.2号では、皆様のお声を伺いたく、アンケートを実施させていただきました。ご意見をお待ちしております！
初夏だというのにぐずぐずしたお天気が続くこの頃。ゴールデンウィークに出した夏物は、まだまだ出番待ちでタンスの中です。
皆さん、季節の変わり目です。風邪など引かないようにお気をつけ下さい！

編集・発行：VSRADユーザー登録事務局

「VSRAD通信」に関するお問合せや、VSRADをご利用中にお困りのことがございました場合には、お手数ですが、「VSRADシステムサポートセンター」までお問合せ下さい。（本メールにご返信いただいてもお受けすることができません。）

VSRADシステムサポートセンターメールアドレス
systemhelp@vsrad.jp

Copyright(C)2006

Eisai Co.,Ltd. & Pfizer Japan Inc.