


「VSRAD(ブイエスラド)通信」は、早期 AD 診断支援システム「VSRAD」のユーザー登録を
いただいている皆様へ、VSRAD に関する最新情報やご利用に役立つ情報をお知らせする
ニュースレターです。

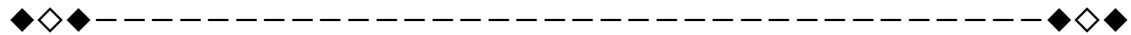

こんにちは！VSRAD ユーザー登録事務局です。

「VSRAD(ブイエスラド)通信」では、VSRAD ユーザーの皆様から多くいただいたお問合せや、
開発最新情報、システムについてのご連絡などをお届けいたします。

今回は、3T MRI 装置への対応、動作環境の変更についてご案内をいたします。

INDEX

- |
- | 《1》3T MRI 装置への対応について(VSRAD advance)
- |
- | 《2》Windows XP 動作保証終了のご案内
- |
- | 《3》事務局より～編集後記
- |

《1》3T MRI 装置への対応について(VSRAD advance)

* VSRAD plus、VSRAD Ver.2.0 には対応していません *

VSRAD は、リリース以来 1.5T MRI 装置で撮像した画像のみ使用可能でしたが、
近年普及が進む 3T MRI 装置でも使用したいとのご要望を多くいただきまいりました。

そこで、3T MRI 装置の各メーカーにご協力いただき、VSRAD advance の入力画像要件を
もとに、3T 用のメーカー推奨撮像条件を作成いたしました。

3T でも、これまで同様、1.5T の健常者データベースをご使用いただけます。

ただし、1.5T と 3T では解析結果が異なりますので、経過観察はできる限り同一磁場強度で
行ってください。

※詳しくは、VSRAD ホームページの「マニュアル・パンフレット」「Q&A」のページをご覧ください。

<マニュアル・パンフレット>

<http://www.vsrad.info/general/manual/index.html>

<Q&A>

http://www.vsrad.info/general/q_a/index.html

《2》Windows XP 動作保証終了のご案内

Windows XP については、2014年4月9日をもってマイクロソフト社のサポートが終了したため、推奨動作環境の対象 OS から外すことにいたしました。

現在 Windows XP をご使用の場合、そのままご使用いただくことは可能ですが、今後、OS に起因する不具合が発生した場合は、サポート対象外となりますことをご了承ください。

※詳しくは、VSRAD ホームページの「VSRAD 動作環境」のページをご覧ください。

<http://www.vsrad.info/general/dousa/index.html>

《3》事務局より～編集後記

東京でも新緑が芽生え始め、さわやかな風を感じる今日この頃。

これから少しずつ暖かくなり、心地良い季節がやってきますね！

とはいえ、まだまだ朝晩の冷え込みは厳しいこととしますので、皆様、どうぞお体にお気をつけて元気にお過ごしください！！

編集・発行：VSRAD ユーザー登録事務局

※「VSRAD(ブイエスラド)通信」に関するお問合せや、VSRAD をご利用中にお困りのことがございました場合には、お手数ですが、「VSRAD システムサポートセンター」までお問合せ下さい。
(本メールにご返信いただいてもお受けすることができません。)

VSRAD システムサポートセンターメールアドレス：systemhelp@vsrad.jp

※配信停止をご希望の場合はお手数ですが、件名に「配信不要」等のコメントを明記の上、このメールにご返信をお願いいたします。

Copyright(C)2014, Eisai Co.,Ltd..
