

「VSRAD 通信」は、早期 AD 診断支援システム「VSRAD」のユーザー登録をいただいている皆様へ、VSRAD に関する最新情報やご利用に役立つ情報をお知らせするニュースレターです。

-----

こんにちは！VSRAD ユーザー登録事務局です。

「VSRAD 通信」は、VSRAD ユーザーの皆様から多かったですお問合せや、開発最新情報、システムについてのご連絡などについてお届けさせていただきます。

今回は、VSRAD のアップデートについてご連絡させていただいております。

必ずお読み下さい！

## I N D E X

《1》【重要】アップデート提供のご案内

《2》事務局より～編集後記

《1》【重要】アップデート提供のご案内

VSRAD のアップデートのご提供準備ができましたのでご案内致します。

### 【バージョンアップ内容】

- ・ヘッダ情報が入れ子構造の DICOM ファイル対応
- ・サムネール付き DICOM ファイル対応
- ・複数フォルダ分割の DICOM ファイル対応

特に下記の現象が見られるユーザー様は必ずアップデートをご利用下さい

- 1) DICOM 画像を読み込むと「既に読み込まれたファイルなので、読み込めません。」というメッセージが表示されることがある。
- 2) DICOM 画像を VSRAD で取り込むと、画像サイズを実物よりも小さく認識し (ex.64×64)、正しく処理できないことがある。
- 3) MRI 装置から DICOM 画像を CD に書き出し、VSRAD で読み込むと、同一症例と識別されないことがある。

### 【ご提供方法】

対応バージョンのご提供をいたします。

下記 URL にアクセスし、ID・パスワードを入力して下さい。

<http://www.vsrad.com/download>

ID・パスワード(同一): vsrad (英字半角小文字)

サイトでは、アップデートに関するご説明をいたしております。

サイト文中にございます URL をクリックして、アップデートファイルをダウンロードして下さい。

環境によっては ID・パスワードを再度入力する必要があります。お手数ですが、 と同一のものを入力して下さい。

ダウンロードしたファイルをダブルクリックして下さい。  
ファイルは自己解凍形式の圧縮ファイルとなっております。

ファイル ( VSRAD\_updater\_2\_00\_0021.exe ) を VSRAD Ver2.0 がインストールされている PC で実行し、画面の指示に従って操作して下さい。

## 《 2 》事務局より～編集後記

今回は VSRAD のアップデートについて、ご案内させていただきました。  
ご対応のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

夕方、ふと窓の外を見ると、何だか以前より日が落ちるのが早くなったような・・・。  
夏の終わりを感じはじめる今日この頃ですが、暑さはまだまだ続きそうですね。  
気付かないうちに夏の疲れがたまり始めている頃です。  
皆さん、お体に気をつけてお過ごし下さい！

編集・発行：VSRAD ユーザー登録事務局

「VSRAD 通信」に関するお問合せや、VSRAD をご利用中にお困りのことがございました場合には、  
お手数ですが、「VSRAD システムサポートセンター」までお問合せ下さい。(本メールにご返信いた  
だいてもお受けすることができません。)

VSRAD システムサポートセンターメールアドレス  
systemhelp@vsrad.jp

Copyright(C)2006

Eisai Co.,Ltd. & Pfizer Japan Inc.