

VSRAD通信 2007.02.28 Vol.6号

「VSRAD通信」は、早期AD診断支援システム「VSRAD」のユーザー登録をしていただいている皆様へ、VSRADに関する最新情報やご利用に役立つ情報をお知らせするニュースレターです。

こんにちは！VSRADユーザー登録事務局です。

「VSRAD通信」では、VSRADユーザーの皆様から多かったお問合せや、開発最新情報、システムについてのご連絡などについてお届けいたします。
今回は、メーカー推奨撮像条件の変更や、補助ツール「Data Remover for VSRAD」のご案内など、情報が盛りだくさんです！
是非お読み下さい！

I N D E X

- 《1》MRIメーカー推奨撮像条件変更のお知らせ（フィリップス社）
- 《2》DICOM画像個人情報削除ツール「Data Remover for VSRAD」のご案内
- 《3》Windows Vistaにおける動作について
- 《4》事務局より～編集後記

《1》MRIメーカー推奨撮像条件変更のお知らせ（フィリップス社）

この度、株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパンにご提示いただいていた推奨撮像条件に、新たな要件が加わりました。フィリップス社のMRIをご利用の方はご注意ください。

追加項目

【設定項目】「Contrast」の「partial echo」
【設定値】no

partial echoはTEを短くすることができる利点がありますが、その分非常に磁化率に敏感になってしまい、空気に触れている部分にアーチファクトが出やすくなるため、解析結果に影響を及ぼす恐れがあります。

なお、フィリップス社の対応機種は以下の通りです。

- ・ Gyroscan NT、NT -Intera、InteraのRelease8以上
- ・ AchieveのRelease1以上

その他、MRIメーカーによる推奨撮像条件につきましては、「テクニカルシリーズ1 MRI装置メーカーによる推奨撮像条件」をご覧ください。

「テクニカルシリーズ1 MRI装置メーカーによる推奨撮像条件」お取り寄せ方法

- (1) 紙媒体：担当のMRにご連絡下さい。
- (2) データ：VSRADホームページの「マニュアル・パンフレット」ページよりpdfデータをダウンロードして下さい。

《 2 》 DICOM画像個人情報削除ツール「Data Remover for VSRAD」のご案内

DICOM画像は枚数が多く、ヘッダー領域に個人情報が記録され容易には個人情報が削除できないため、個人情報削除・書き換え、ファイル名の変更などが簡便にできるアプリケーション「Data Remover for VSRAD」をご用意いたしました。

VSRADシステムサポートセンターでは、処理エラーや異常処理結果などのお問合せに対し、必要に応じて被験者の画像をお預かりして確認させていただいておりますが、その際、個人情報を削除した上で送りいただくようお願いしております。個人情報削除の際に、是非ご利用下さい。

「Data Remover for VSRAD」はVSRADホームページ「アップデート・補助ツール」ページよりダウンロードできます。
詳しくはホームページをご覧ください！

《 3 》 Windows Vistaにおける動作について

Windows Vista発売に伴い、VSRADの動作に関するお問い合わせが増えております。

これまでのところ、VSRADが動かないという情報は得られておりませんが、動作保証できるまでの検証が終了しておりません。もうしばらくお待ちください。

《 4 》 事務局より～編集後記

今年最初のVSRAD通信をお届けさせていただきました。
本年もどうぞ宜しくお願いいたします！

この間おせちを食べていたかと思いきや、あっという間に1月はゆき、2月は逃げて行ってしまいました。このまま3月にも去られ・・・でも、そうしたら暖かい春がやって来ますね

まだまだ寒い日が続いております。
どうぞお体にお気をつけて元気にお過ごしください！

編集・発行：VSRADユーザー登録事務局

「VSRAD通信」に関するお問合せや、VSRADをご利用中にお困りのことがございました場合には、お手数ですが、「VSRADシステムサポートセンター」までお問合せ下さい。（本メールにご返信いただいてもお受けすることができません。）

VSRADシステムサポートセンターメールアドレス
systemhelp@vsrad.jp

Copyright(C)2007
Eisai Co.,Ltd. & Pfizer Japan Inc.